

肌シート HADA SHEET 使用方法

●はじめに・・・・・・・・

肌シート(HADA SHEET)は、当社の各消音・消臭製品の効果と経済性を高めます。

肌シートには肌の角質が剥がれにくくて柔らかく、しっかり密着し固定するサージカルフィルムを使用しています。

MUTEE や PASS FREE の肛門からの浮きや剥がれを防ぎ、肌からの湿気は外へ出し外部からの水や汚れの侵入は防ぐのが特徴です。

肌シートを活用し、それぞれのグッズを有効的また経済的にお使いください。

安全にお使いいただくために、用途以外の使用はせず、説明書に従ってご使用ください。

なお、商品についてご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

●規格と各部の名称・・・・・・・・

HADA SHEET 剥離紙+サージカルフィルム+支持フィルム

MUTEE FREE 用：寸法 50×100mm 図1.

PASS FREE-M 用：寸法 M：75×110mm、L：100×120mm 図2.

-G 用：寸法 M：75×110mm、L：100×120mm 図3.


-W 用：寸法 M：75×110mm、L：100×120mm 図3.

●使用上のご注意・・・・・・・・

- ・本品は健常皮膚の保護を目的としているので未滅菌です。
- ・汗を多くかいたときは剥がれやすくなることがあります。
- ・肌荒れ予防のため本品を使う前と剥がした後に、おしりにスキンローションや軟膏を塗ることをおすすめします。
- ・剥がす時は体毛の流れに気をつけてゆっくり剥がしてください。剥がした肌シートは再使用できません。
- ・使用前または本品の使用により発疹、かゆみ等異常がある場合は使用しないでください。
- ・直射日光を避け、冷暗所に保管してください。

●使用手順・・・・・・・・

- ①肌シートをテーブルの上に置き中央の青いツマミを持ち剥離紙を左右に開き折り曲げると中央に3×4cmの開口部が現れます。粘着フィルムがくっつき合わないようご注意ください。
- ②MUTEE のパンチング部分または PASS FREE 開口部に肌シートの開口部が入るように合わせて上下左右に注意して接着します。

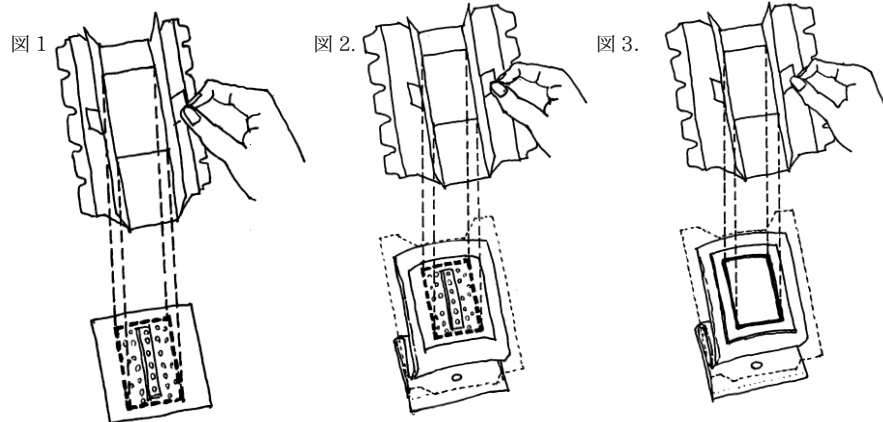

製造販売元) 合同会社ピースマギー (<http://www.syosyu.jp>)

Tel & Fax 076-254-0464

〒920-0226 石川県金沢市粟崎町4丁目7-11