

消臭シート PASS FREE-W 使用方法

●はじめに・・・・・・・・

軽い水様便を伴う過敏性腸症候群・リーキーガット症候群・呑気症・おなら恐怖症などでおならと水様便のニオイにお悩みの方が、学校の授業や会社の会議など人なかで安心して過ごせるように開発されました。

これまでは毎日使い捨てだった消臭シート PASS FREE をより経済的に使えるようにするために、肌シートと吸水紙だけを毎日取り換えて1週間連続して使えるようになりました。

肌の角質を剥がしにくくおならの横漏れを防ぐサージカルフィルム、水様便を吸い取る吸水紙と瞬間共沸消臭液でニオイを消す PASS FREE が組み合わされました。

安全にお使いいただくために、用途以外の使用はせず、説明書に従ってご使用ください。

なお、商品についてご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

●規格と各部の名称・・・・・・・・

肌シート：剥離紙+サージカルフィルム+支持フィルム 寸法：M:75×110mm、L:100×120mm

PASS FREE：PE袋、スポンジ、不織布、吸水紙 寸法：M:60×180mm、L:90×220mm

瞬間共沸消臭液：SUPER DEO

●使用上のご注意・・・・・・・・

- ・本品は健常皮膚の保護と振動吸収を目的としているので未滅菌です。
- ・袋内が乾燥した場合は、排気口から消臭液を1～2ml注入してください。
- ・お肌に異常がある場合または本品がお肌に合わない場合には絶対に使用しないでください。また、肛門部分以外への使用はしないでください。
- ・肛門部分は清潔な状態でお使いください。
- ・肌の角質が剥がれにくいサージカルフィルムを使用していますが、肌荒れ予防のため本品を使う前と剥がした後、おしりにスキンローションや軟膏などを塗ることをおすすめします。
- ・肌シートを剥がす時は、体毛の流れに注意してゆっくり剥がしてください。
- ・汚れた吸水紙はトイレに流してください。
- ・カビの発生を防ぐために、冷蔵庫に保管し早めにお使いください。
- ・直射日光を避け、小児の手の届かないところに保管してください。


●使用手順・・・・・・・・別図参照

- ① PASS FREE 下部の青いツマミを剥がします。丸いシール部は排気口です。
- ② 肌シート中央の青いツマミを持ち剥離紙を左右に開き折り曲げます。
- ③ 中央部に3×4cmの開口部が現れます。吸水紙がセットされています。
- ④ 肛門部分を清潔な状態にしてから肌荒れ予防のスキンローションや軟膏をおしりに塗ります。
- ⑤ 便座に座り、右図のように中指先を開口部裏面の中央に置き、左右を指で挟みます。
- ⑥ 空いている片方の手でおしりの横から肛門の位置を確かめ、肛門付近をその手で引っ張りできるだけ平らになるようにします。
- ⑦ 肌シートを指に挟んだまま股間から手を差し入れ、おしり凹部に沿って進み、開口部の前方から中央部分を肛門位置に合わせて密着させます。(女性は前方)
- ⑧ 前後の肌シート粘着部を密着させます。続いて剥離紙を取り外し左右の肌シート粘着部を密着させます。次に裏面の透明支持フィルムも外します。**完成!**
- ⑨ 肌シートを剥がす時はまず PASS FREE の袋をもって剥がし、それから片方の手で肌を押さえながらサージカルフィルムの隅をつまみ、体毛の流れに沿ってゆっくりと剥がしてください。剥がした肌シートは再使用できません。
- ⑩ 新しい肌シートに貼りかえる時はまず PASS FREE の袋をもって剥がし、それから肌シート中央の青いツマミを持ち剥離紙を左右に開き折り曲げると、中央に3×4cmの開口部が現れます。
- ⑪ PASS FREE 開口部分に新しい肌シートの開口部に合わせて注意して接着します。吸水紙を開口部にセットします。**完成!**
- ⑫ 再度①からの手順でお使いください。

製造販売元) 合同会社ピースマギー (<http://www.sposyu.jp>)

TEL & FAX 076-254-0464

〒920-0226 石川県金沢市葉崎町4丁目7-11

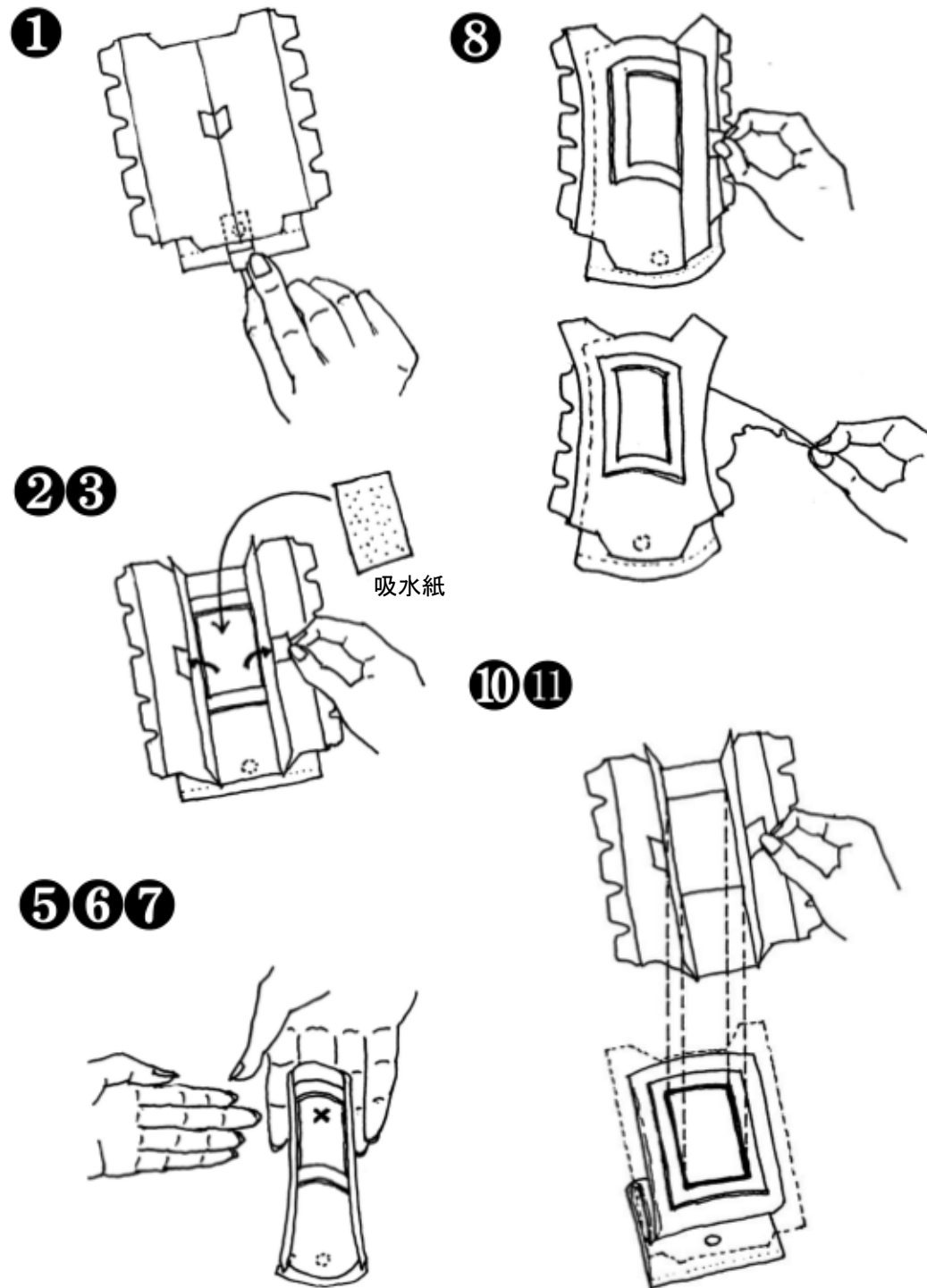

吸水紙