

「こんながあると便利」「こんながあると助かる」といった声が  
そのまま形になった商品です


特許出願中

## 車イス生活の新たな必需品

### 車いす補助用具

肘を優しく保護するセーフティクッション

# リラふあ

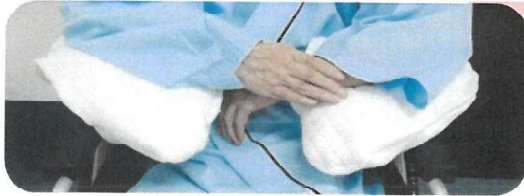

### 絶妙な硬さと厚さによる優れた『体圧分散性』

高級寝具に匹敵するウレタン素材が衝撃を吸収し、ひじにかかる体圧を効果的に分散することで、ひじの痛みを抑えます。

- ひじを乗せ長時間使用しても柔らかくて気持ちがよく、腕全体が楽であるとの感想を頂いております。
- 前腕と脇の間に挟んで除圧クッションとしても使用できます。

### 車椅子座位時の下肢や

### 体幹のねじれに対しても使用できます 『体幹のねじれに対応』

外まわりの生地は、当社と東亜紡織㈱が共同開発した竹の繊維でつくられた通気性の良い画期的なパイル生地です。竹がもつ強い抗菌力を独自の製法で生地に生かしているため衛生的かつ耐久性にも優れています。また、汚れても洗濯可能ですのでいつでも清潔さを保つことができます。



### 使用方法

- 背中部分のクッション②で固定しているのので、腕部分のクッション①と③がずれません。また床に落とすことなくご自身でセット出来ます。
- ②の背中部分はメッシュ生地を使用し、通気性が良く衛生的です。
- スナップで各パーツ①②③が分離できるので車いす以外でも個々に使用可能です。

裏面のスナップで長さ調節可能！



### サイズ

丸型クッション部分 ①③  
縦 約380mm × 横 約250mm × 厚さ 約80mm  
シート部分 ② (スナップにより幅が3段階に調節可能 最大 約680mm ~ 最小 約500mm)  
縦 約870mm × 横 約300mm × 厚さ 約15mm

### お問い合わせ先



ブルネエズ株式会社

〒465-0041 名古屋市名東区朝日が丘 75-5

Brunaise TEL(052)774-4688 FAX(052)775-8186



特許取得済み・意匠登録済み・  
商標登録済みの製品が多数あります。

類似品にはご注意ください

# リラふぁ 使い方ガイド

## 1 アームレストの上に置いて姿勢保持



肩の重みを軽減したり、柔らかく前腕を支え外傷を予防することができます。

## 2 体幹のねじれに対応



車椅子座位時の下肢や体幹のねじれに対しても使用できます。

## 3 上肢の屈曲拘縮への対応



上肢の強度な屈曲拘縮に対しては、リラふぁの先の部分を腕の間に挟んで除圧することができます。

## 4 安全で清潔



背部を通してつながっているので、ずれて落下することがなく安全です。また、汚れても洗濯可能ですのでいつでも清潔さを保つことができます。

## 5 姿勢の補正に



車椅子用のクッションを座面に併用し、腰のくぼみにリラふぁを挟み安定したポジショニングを取ることで、上半身がリラックスして両手、口、のどが動きやすくなり、誤嚥防止に役立ちます。