

「こんながあると便利」「こんながあると助かる」といった声が
そのまま形になった商品です

特許出願中

まるでソファのような車椅子

車いす補助用具

肘を優しく保護するセーフティクッション

リラふあ



※写真の座面クッションは別売りです。

絶妙な硬さと厚さによる優れた『体圧分散性』



ひじにかかる体圧を効果的に分散することで、ひじの痛みを抑えます。
また、腕部分のクッションをアームレストに固定することで肘をサポートすることができ、背中部分のクッションを背もたれにつけることで通気性を保ちます。

背もたれに♪



外まわりの生地は、柔らかい肌触りのシンカーパイル（タオル地）を使用しています。シンカーパイルは表面がループ状になっており表面積が大きいので、吸水性・保温性に優れています。そのため、夏は汗をかいてもサラサラ、冬はふんわり暖かくオールシーズン快適にお使いいただけます。また、汚れても洗濯可能ですので、いつでも清潔さを保つことができます。

- ひじを乗せ長時間使用しても柔らかくて気持ちがよく、腕全体が楽であるとの感想を頂いております。
- 前腕と脇の間に挟んで除圧クッションとしても使用できます。



使用方法

- 背中部分のクッション②で固定しているのので、腕部分のクッション①と③がずれません。また床に落とすことなくご自身でセット出来ます。
- ②の背中部分はメッシュ生地を使用し、通気性が良く衛生的です。
- スナップで各パーツ①②③が分離できるので車いす以外でも個々に使用可能です。



お問い合わせ先



ブルネエズ株式会社

〒465-0041 名古屋市名東区朝日が丘 75-5

TEL(052)774-4688 FAX(052)775-8186



特許取得済み・意匠登録済み・
商標登録済みの製品が多数あります。

類似品にはご注意ください

リラふぁ 使い方ガイド

1 アームレストの上に置いて姿勢保持



肩の重みを軽減したり、柔らかく前腕を支え外傷を予防することができます。

2 上肢の屈曲拘縮への対応



上肢の強度な屈曲拘縮に対しては、リラふぁの先の部分を腕の間に挟んで除圧することができます。

3 安全で清潔



背部を通してつながっているので、ずれて落下することがなく安全です。また、汚れても洗濯可能ですのでいつでも清潔さを保つことができます。

4 姿勢の補正に



車椅子用のクッションを座面に併用し、腰のくぼみにリラふぁを挟み安定したポジショニングを取ることで、上半身がリラックスして両手、口、のどが動きやすくなり、誤嚥防止に役立ちます。